

# Magic Former

Noritake

Liquide à modeler pour la porcelaine Margin 20 ml

## Utilisation

Mélanger le Magic former avec la porcelaine Margin Noritake comme avec tout autre liquide à modeler. Permet séchage et durcissement après montage.

## Caractéristiques

- Il a de fortes propriétés adhésives contre l'opaque. Après séchage, il devient vraiment dur.
- Il est facile d'ôter la chape du die sans déformer le joint céram.
- Gain en temps lors de restaurations.

## Instructions

1. S'assurer de l'application d'un durcisseur de die avant le montage. Appliquer ensuite le Magic Separator sur la zone marginale du die.
2. Mélanger la porcelaine Margin sur la palette avec le Magic Former.
3. Appliquer la masse Margin sur la partie souhaitée de la zone cervicale. Condenser légèrement et positionner sur le die. Tasser légèrement avec une spatule.
4. Enlever l'excès de porcelaine Margin de manière à former une structure triangulaire. Laisser durcir jusqu'au séchage. Attendre un changement de coloration vers le blanc.  
Note : Si le joint céram est important, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage.
5. Ôter délicatement l'armature du die(s). Cuire suivant le tableau de cuisson ci-dessous.
6. Pour des applications additionnelles, appliquer à nouveau le Magic Separator et répéter les étapes 3 à 5.

	Basse T° °C	Temps séchage min	T° début du vide °C	Rampe °C/min	Vide kPa	T° fin du vide °C	Durée maintien min	Haute T° °C	Refroidisse- ment sec
EX-3 Margin Porcelaine	700	7	700	55	96	935	0	945	10
EX-3 MRP (porcelaine de retouche)	700	7	---	55	---	---	0	850	10
CERABIEN Margin Porcelaine	700	7	700	50	96	1030	1	1030	240
CERABIEN MRP (porcelaine de retouche)	700	7	---	45	---	---	0	900	240

\* Comme les températures actuelles et nominales peuvent différer selon le four, veiller à ajuster vos températures.

\*\* 96 kPa = 72 cmHg

\*\*\* Ne pas utiliser avec de l'Addmate, porcelaine de correction basse fusion, ou avec de la porcelaine TI-22

### Précautions d'emploi

- Dans le cas de montage de plusieurs éléments, faites-les un à la fois. Une fois la masse Margin durcie, il est difficile d'ôter l'excès.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de porcelaine sur la ligne marginale.
- Pour garder la porcelaine humide sur la palette, ajouter seulement de l'eau distillée. Rajouter du Magic Former rendra le mélange trop épais et pourra causer une décoloration durant la cuisson.
- Si vous voulez réutiliser de la porcelaine Margin durcie, casser les morceaux en petites pièces, rajouter de l'eau distillée et re-mélanger complètement.
- Les traces de porcelaine Margin durcie sur vos outils et votre palette peuvent être nettoyées avec de l'eau.
- Veiller à nettoyer et à fermer hermétiquement le capuchon pour augmenter la durée de conservation du produit.
- Une fois le flacon ouvert, éviter les températures élevées et l'exposition directe à la lumière du soleil. Utiliser le produit aussi rapidement que possible, la durée de conservation étant limitée.
- Bien suivre le tableau de cuisson recommandé, surtout pour la Basse température et le temps de séchage - importants pour éviter un manque de cuisson. Au cours du séchage, la position de la plate-forme dépend du four - en suivant le Programme de cuisson Noritake, la restauration devra être placée à l'entrée du moufle pour toute la durée du séchage quand le four est à basse température.
- Comme le four peut ne pas être calibré avec précision, nous recommandons la cuisson de pièces tests pour vérifier la température avant la cuisson d'un cas réel.

### Instructions de sécurité

- ✓ Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, essuyer avec de la gaze ou un mouchoir et laver à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
- ✓ Utiliser seulement dans une zone convenablement ventilée. Des émanations gazeuses apparaissent durant la cuisson.
- ✓ A usage uniquement destiné aux dentistes et aux prothésistes dentaires.
- ✓ Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux indiqués ci-dessus.