

Magic Separator

Noritake

Séparateur Porcelaine de type stylo 3,5 ml

Utilisation

Le Magic Separator est un isolant porcelaine / modèle pour les joints céramique-dent, pour la surface gingivale (sous les bridges) et pour les zones adjacentes (proximale et antagoniste).

Caractéristiques

- Le Magic Separator, de type stylo, permet une utilisation très pratique. Il est facile d'obtenir un film de l'épaisseur appropriée.
- L'action séparatrice est très sûre, même si la porcelaine est fine. Cela permet d'obtenir plus facilement une insertion et un ajustage ultra-précis de la porcelaine Margin.
- Il s'élimine à une température assez basse, il peut ainsi être utilisé pour les porcelaines basse fusion - ex. réparation de zone marginale pour PLV-.

Instructions

1. S'assurer de l'application d'un durcisseur de die avant le montage. Appliquer ensuite le Magic Separator là où la porcelaine sera en contact avec le modèle.
2. Appliquer la porcelaine puis ôter la chape du die comme d'habitude. Si vous utilisez le Magic Separator avec le Magic Former, l'isolation sera même plus sûre.
3. Au stade de la seconde application de porcelaine, appliquer à nouveau le Magic Separator avant de remonter de la céramique.

Précautions d'emploi

- Si la surface du modèle n'est pas préparée avec un durcisseur de die, l'efficacité du Magic Separator sera diminuée. Le traitement de surface du die est fortement recommandé.
- Bien refermer le capuchon après chaque usage. Eviter de ranger le Magic Separator à côté d'une forte source de chaleur ou directement à la lumière du soleil.

Instructions de sécurité

- ✓ Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, essuyer avec de la gaze ou un mouchoir et laver à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.
- ✓ A usage uniquement destiné aux dentistes et aux prothésistes dentaires.
- ✓ Ne pas utiliser ce produit pour d'autres usages que ceux indiqués ci-dessus.